


Manual del usuario: SOLMATS SOLWEY

Plataforma Bipedestación SOLWEY

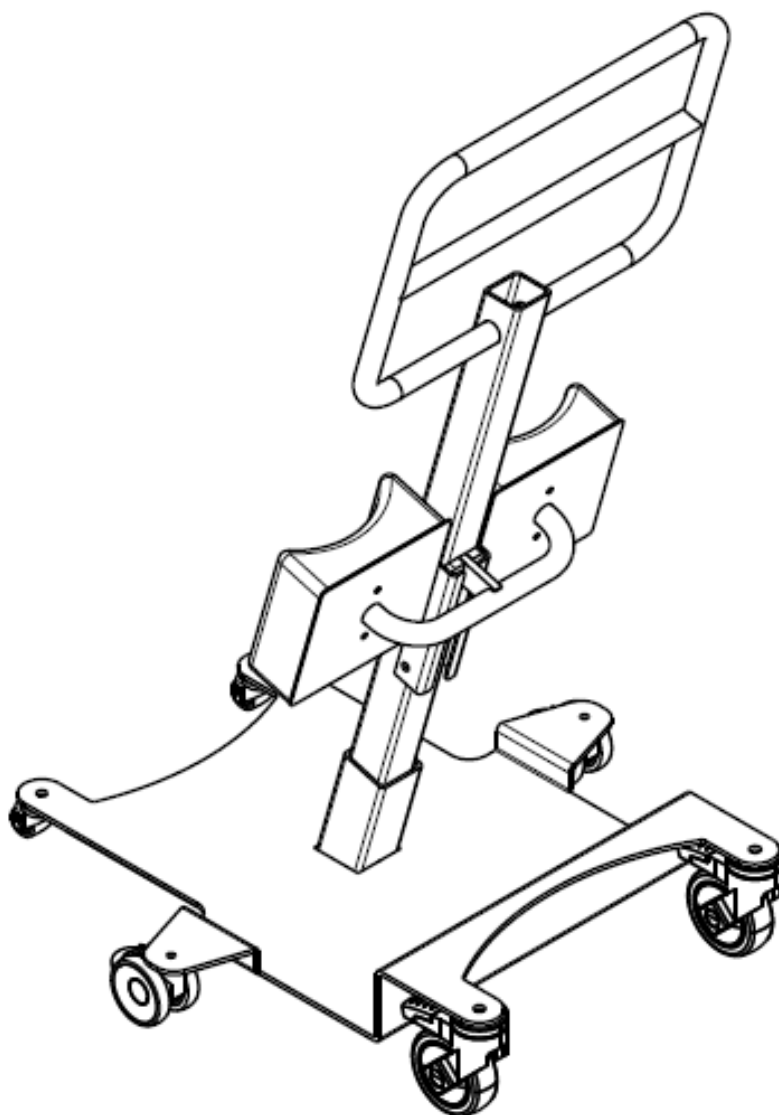

DISTRIBUIDOR: Este manual **DEBE** ser entregado al usuario del producto.

USUARIO: **ANTES** de usar este producto, lea este manual y consérvelo como referencia para el futuro.

ADVERTENCIA


ANTES DE USAR ESTE EQUIPO, LEA Y COMPRENDA TOTALMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL. SI NO ENTIENDE LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES, COMUNÍQUESE CON UN DISTRIBUIDOR CALIFICADO O PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ANTES DE INSTALAR EL EQUIPO, YA QUE DE LO CONTRARIO PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES FÍSICAS O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA SOBRE ACCESORIOS

Los productos Solmats están específicamente diseñados y fabricados para usarse con los productos Solmats. Solmats no ha sometido a prueba los accesorios diseñados por otros fabricantes, por lo que no recomienda usar dichos accesorios con productos Solmats.

LEYENDA DE SÍMBOLOS

 "ATENCIÓN Consulte las condiciones de utilización"

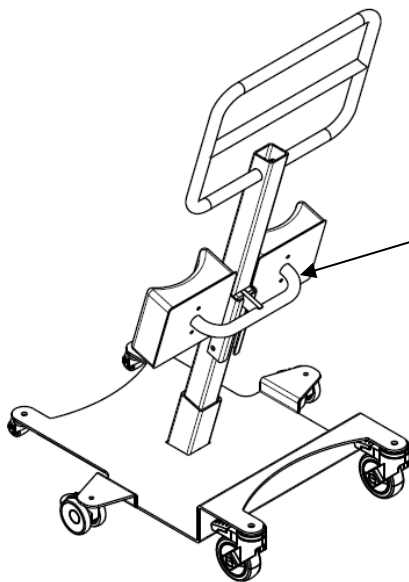

ADVERTENCIA: SIEMPRE sea consciente de la posición del apoyo de piernas de la plataforma. El paciente podría sentir sensación de inestabilidad.



2014: "Fecha de fabricación"

CONTENIDO

LEYENDA DE SÍMBOLOS.....	2
NOTAS ESPECIALES.....	4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	5
PARAMETROS TÉCNICOS:	6
PARTE 1 - PAUTAS GENERALES	7
Límite de peso	7
Montaje de la plataforma	7
Utilización de las eslingas.....	7
Operación de la plataforma	9
Elevación del paciente.....	9
Traslado del paciente	9
Tareas de mantenimiento	10
PARTE 2—MONTAJE.....	11
Montaje de la plataforma	11
Montaje del mástil a la base	11
PARTE 3—OPERACIÓN.....	12
Operación de la plataforma	12
Ajuste de la posición apoya piernas.....	13
PARTE 4—ELEVACIÓN DEL PACIENTE	14
Elevación/descenso del paciente	15
Elevación/descenso del paciente, sin ayuda:.....	15
Elevación/descenso del paciente, con ayuda, eslinga transferencia:.....	15
PARTE 5—TRASLADO DEL PACIENTE	16
Traslado a una silla o silla de ruedas:.....	17
PARTE 6—SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	19
PARTE 7—MANTENIMIENTO	20
Limpieza de la eslinga y la plataforma	21
Detección de desgaste y daños	21
Lubricación de la plataforma.....	21
SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTIAS	22
CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD C.E.....	23

NOTAS ESPECIALES

En este manual se utilizan palabras clave que indican prácticas peligrosas o inseguras que podrían provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Consulte la siguiente tabla para ver las definiciones de las palabras clave.

PALABRA CLAVE	SIGNIFICADO
PELIGRO	Indica una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves o letales.
ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones graves o letales.
PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños a la propiedad o lesiones leves (o ambos).




AVISO

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

MANTENIMIENTO:

SÓLO personal calificado DEBE efectuar tareas de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

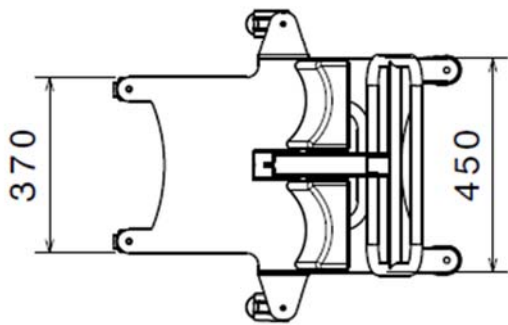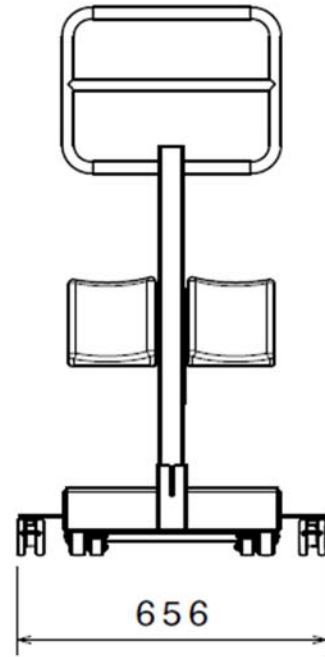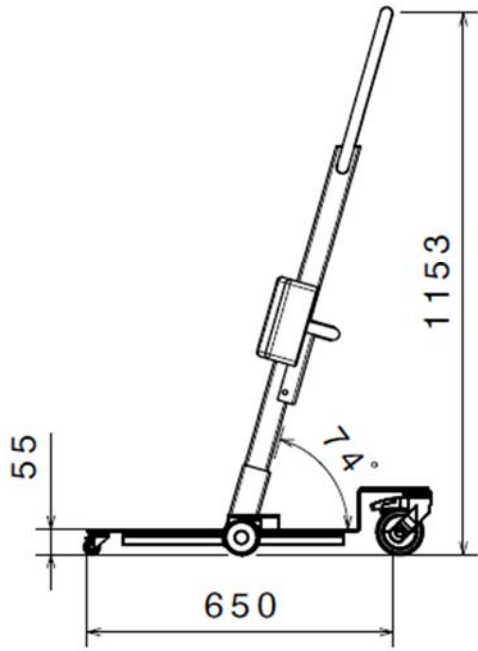

PARAMETROS TÉCNICOS:

Capacidad máxima de altura	5,5 cm
Posición más baja (altura mín.)	5,5 cm
Ancho interno a alcance máximo	32 cm
Ancho total, medición externa	65,6 cm
Altura del suelo a la base (inferior)	3 cm
Altura del suelo a la base (parte delantera)	14,7 cm
Altura del suelo a la base (parte posterior)	5,5 cm
Largo general	72,5 cm
Ancho general parte delantera (ruedas grandes)	45 cm
Área de elevación (margen de altura)	0 cm
Ancho general parte posterior (ruedas pequeñas)	37 cm
Radio de giro	360º
Opciones de eslinga	Traslado
Material de eslinga	Poliéster
Peso total (fuera de la caja)	XX kg
Peso, mástil incluyendo batería	XX kg
Peso base (sin mástil)	XX kg
Peso, soporte de rodillas	XX kg

PARTE 1 - PAUTAS GENERALES

ADVERTENCIA

PARTE 1 - Las PAUTAS GENERALES contienen información importante para operar y usar este producto de forma segura.

Antes de usar el equipo, revise todas las partes por si sufrieron daños durante el envío. Si presentan daños, NO use la unidad. Comuníquese con su distribuidor para obtener las instrucciones al respecto.

La plataforma Solmats SOLWEY, NO es un dispositivo de transporte. Está diseñada para trasladar un individuo desde una superficie de reposo a otra (por ejemplo desde una silla a una silla de ruedas).

NO realice ningún traslado/transferencia de pacientes sin la aprobación del doctor, profesional de enfermería o asistente médico. Lea completamente las instrucciones en este manual del usuario, observe a un equipo calificado de expertos efectuar los procedimientos de incorporación y luego realice todo el procedimiento de incorporación varias veces con la supervisión adecuada y un individuo debidamente designado que simule ser un paciente.

Utilice la eslinga recomendada por el doctor, profesional de enfermería o asistente médico del paciente para la comodidad y seguridad del individuo que va a ser levantado.

Si la plataforma Solmats SOLWEY se usa en el área de una ducha o baño, cerciórese de eliminar toda humedad con un paño tras la utilización. NO guarde la plataforma en un área o entornos húmedos. Inspeccione periódicamente todos los componentes de la plataforma en busca de señales de corrosión. Reemplace todas las partes que presenten corrosión o daños.

Límite de peso

NO exceda el límite de peso máximo de 150 kg.

Montaje de la plataforma

NO apriete excesivamente los anclajes de montaje, ya que ello dañará los soportes de montaje.

Utilización de las eslingas

Los individuos que usan la eslinga de transferencia **DEBEN** ser capaces de soportar la mayor parte de su propio peso, de lo contrario se pueden producir lesiones.

Eslingas de transferencia: **NO** use la eslinga de transferencia en conjunto con la plataforma de bipedestación como un dispositivo de transporte. La plataforma está diseñada para trasladar un individuo desde una superficie de reposo a otra (por ejemplo desde una cama a una silla de ruedas).

Eslinga de transferencia: Antes de levantar al paciente, cerciórese de que el borde inferior de la eslinga de transferencia esté situado en la región lumbar del paciente y que los brazos del mismo estén fuera de dicha eslinga.

Eslingas de transferencia: La correa **DEBE** quedar ceñida, pero cómoda en el paciente, ya que de lo contrario puede resbalarse de la eslinga durante el traslado, provocando posibles lesiones, Figura 1.



Figura 1

Tras cada lavado (conforme a las instrucciones de la eslinga), inspeccione que la o las eslingas no presenten desgaste, rasgaduras o costuras sueltas.

Las eslingas decoloradas, desgastadas, con cortes, deshilachadas o rotas son inseguras y podrían provocar lesiones. De ser así, deséchelas inmediatamente.

NO modifique las eslingas.

Revise los accesorios de la eslinga cada vez que se retire y se coloque a fin de garantizar que está correctamente afianzada antes de retirar al paciente de un objeto estacionario (cama, silla o silla inodora).

Si el paciente está en una silla de ruedas, accione sus frenos para prevenir que la silla se mueva hacia adelante o atrás, Figura 1.1.

Operación de la plataforma

Cerciórese de asegurar que la eslinga está correctamente situada en sus soportes, ya que de lo contrario se podrían producir daños o lesiones.

Use los asideros para empujar o tirar de la plataforma.

Elevación del paciente

Antes de posicionar las patas de la plataforma cerca del paciente, cerciórese de que los pies del individuo estén fuera del trayecto de las ruedas, ya que de lo contrario podrían producirse lesiones.

Realice los ajustes de seguridad y comodidad pertinentes antes de mover el paciente. Los brazos del individuo deben estar fuera de las tiras de las eslingas.

Antes de levantar a un paciente desde un objeto estacionario (silla de ruedas, silla inodora o cama), elévelo levemente desde dicho objeto y compruebe que estén afianzados todos los accesorios de la eslinga. Si algún accesorio no está colocado correctamente, baje al paciente y corrija el problema, y luego vuelva a levantarlo y revisar que esté todo en orden.

Durante el traslado, con el paciente apoyado en una eslinga conectada a la plataforma, **NO** deslice la base con ruedas por superficies irregulares que podrían desequilibrar la plataforma y provocar que vuelque. **SIEMPRE** utilice los asideros del mástil para empujar o tirar de la plataforma de bipedestación.

Solmats recomienda frenar las ruedas giratorias traseras **ÚNICAMENTE** al colocar o retirar la eslinga (de transferencia) al paciente.

Solmats **SIEMPRE** recomienda dejar bloqueadas las ruedas durante los procedimientos de incorporación para permitir que la plataforma, para dar estabilidad al elevarse el paciente desde una silla, cama o cualquier otro objeto estacionario.

Traslado del paciente

Antes de efectuar el traslado, compruebe que el producto tenga la capacidad suficiente para soportar el peso del paciente.

Antes de colocar al paciente en una silla de ruedas para transportarlo, los frenos de las ruedas de la silla **DEBEN** estar activados.



Desbloquear



Bloquear

Figura 1.1

Tareas de mantenimiento


Se le debe dar mantenimiento regular a la plataforma y los accesorios para garantizar un funcionamiento adecuado.

Después de los primeros 12 meses de operación, revise todos los puntos de giro y sujetadores en busca de desgaste. Si hay partes metálicas deterioradas, reemplácelas **INMEDIATAMENTE**. Posteriormente, realice esta inspección cada seis meses.

NO ajuste excesivamente los anclajes de montaje, ya que ello dañará los soportes de montaje.

Las ruedas y los pernos de eje deben inspeccionarse cada seis meses para comprobar que estén apretados y que no presenten desgaste.

Puntos susceptibles de Lubricación:

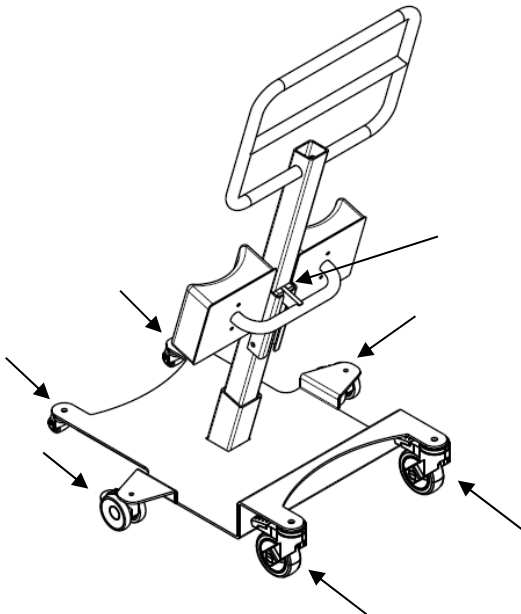

PARTE 2—MONTAJE

Montaje de la plataforma

Montaje del mástil a la base

NOTA: Es posible retirar el mástil de la base para fines de almacenamiento o transporte. El mástil DEBE afianzarse debidamente a la base antes de usar la unidad.

1. Coloque la base en una superficie nivelada de manera que todas las ruedas toquen el suelo.
2. Bloquee todas las ruedas que posean freno de rueda, presionando con el pie en dirección al suelo. En dirección contraria se desbloquea la rueda. Consulte la FIGURA 2.1.



Figura 2.1

2. Destornille los tornillos pero sin quitarlos del mástil.

NOTA: Para este procedimiento, consulte la FIGURA 2.2.

3. Inserte el tubo del conjunto del mástil en el orificio de la base, 1.

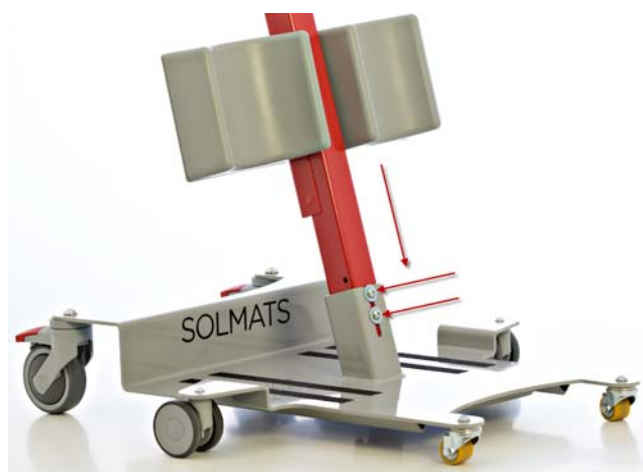


Figura 2.2

4. Sujetando el conjunto del mástil, ajuste y apriete la empuñadura mediante la llave hexagonal interior proporcionada los dos tornillos que existen.

PARTE 3—OPERACIÓN

ADVERTENCIA

NO intente trasladar a un paciente sin la aprobación del doctor, profesional de enfermería o asistente médico. Lea completamente las instrucciones en este manual del usuario, observe a un equipo calificado de expertos efectuar los procedimientos de incorporación y luego realice todo el procedimiento de incorporación varias veces con la supervisión adecuada y un individuo debidamente designado que simule ser un paciente.

NOTA: La utilización de la plataforma por parte de un solo asistente debe basarse en la evaluación que realice el facultativo en cada caso particular.

Operación de la plataforma

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 3.

Bloqueo/desbloqueo de las ruedas traseras

- Para bloquear la rueda: Baje la lengüeta.
- Para desbloquear la rueda: Suba la lengüeta.



Figura 3

Ajuste de la posición apoya piernas

NOTA: Para este procedimiento, consulte la Figura 4.

En la parte posterior del mástil puede encontrar un pomo donde aflojándolo podrá desplazar hacia arriba y abajo el soporte de piernas. Ajuste el apoyo de piernas para que las espumas del soporte queden alineadas con la espinilla de la pierna.

FOTO

Figura 4

- Para aflojar el pomo: gire en sentido anti horario.

FOTO

- Para apretar el pomo: gire en sentido horario.

FOTO

PARTE 4—ELEVACIÓN DEL PACIENTE

ADVERTENCIA

NO exceda el límite de peso máximo de 150 kg.

NO realice ningún traslado de pacientes sin la aprobación del doctor, profesional de enfermería o asistente médico.

SIEMPRE mantenga las manos y dedos lejos de las piezas móviles para evitar lesiones.

Use la eslinga recomendada por el doctor, profesional de enfermería o asistente médico del paciente para la comodidad y seguridad del individuo que va a ser levantado.

Los individuos que usan la eslinga de transferencia **DEBEN** ser capaces de soportar la mayor parte de su propio peso, de lo contrario se pueden producir lesiones.

Antes de levantar al paciente, cerciórese de que el borde inferior de la eslinga de transferencia esté situado en la región lumbar del paciente y que los brazos del mismo estén fuera de dicha eslinga. El cinturón **DEBE** quedar ceñido, pero cómodo en el paciente, ya que de lo contrario puede resbalarse de la eslinga durante el traslado, provocando posibles lesiones.

Tras **CADA** lavado (conforme a las instrucciones de limpieza de la eslinga), inspeccione que la eslinga no presente desgaste, rasgaduras o costuras sueltas. Deseche **INMEDIATAMENTE** cualquier eslinga que no esté en buen estado.

Las eslingas decoloradas, desgastadas, con cortes, deshilachadas o rotas son inseguras y podrían provocar lesiones o daños. Deseche **INMEDIATAMENTE** cualquier eslinga que no esté en buen estado.

NO modifique las eslingas.

NO mueva el paciente si la eslinga no está debidamente afianzada a los puntos de conexión de la plataforma de bipedestación. Compruebe que la eslinga esté afianzada correctamente a los puntos de conexión **ANTES** de levantar al paciente.

Durante el traslado, con el paciente suspendido en la eslinga, **NO** deslice la base de la unidad por superficies irregulares que podrían desequilibrar la plataforma.

Siempre utilice los asideros del mástil para empujar o tirar de la plataforma.

NOTA: Encontrará mayor información en el folleto de la eslinga para pacientes.

Elevación/descenso del paciente

NOTA: Para este procedimiento, consulte las siguientes figuras.

Elevación/descenso del paciente, sin ayuda:

- Indique al paciente que ponga los pies en la base.
FOTO
- Indique al paciente que con las manos se agarre a los soportes del mástil.
FOTO
- Indique al paciente que puede levantarse haciendo fuerza con las piernas y ayudándose de los brazos.
FOTO
- Para descender, se realiza el proceso inverso.

Elevación/descenso del paciente, con ayuda, eslinga transferencia:

- Indique al paciente que ponga los pies en la base. Si no puede por el mismo ayude al paciente a poner los pies sobre la base.
FOTO
- Indique al paciente que con las manos se agarre a los soportes del mástil.
FOTO
- Introduzca la eslinga en soporte del mástil.
FOTO
- Pase la eslinga por debajo de la zona lumbar del paciente.
FOTO
- Indique al paciente que puede levantarse haciendo fuerza con las piernas y ayudándose de los brazos.
FOTO
- Tire con fuerza del otro extremo de la eslinga deslizable para ayudar al paciente a levantarse.
FOTO
- Coloque el extremo de la eslinga en el soporte para evitar que el paciente pueda caer de espaldas.
FOTO
- Para descender, se realiza el proceso inverso.

PARTE 5—TRASLADO DEL PACIENTE

ADVERTENCIA

NO exceda el límite de peso máximo de 150 kg.

NO intente trasladar a ningún paciente sin la aprobación del doctor, profesional de enfermería o asistente médico.

NO mueva el paciente si la eslinga no está debidamente afianzada a los puntos de conexión de la plataforma. Compruebe que la eslinga esté afianzada correctamente a los puntos de conexión antes de levantar al paciente. Si algún accesorio no está debidamente en su lugar, corrija el problema. Cuando la eslinga se alza unas cuantas pulgadas/centímetros respecto a la superficie estacionaria y antes de mover al paciente, vuelva a comprobar que estén en su lugar todos los accesorios de dicha eslinga. Si algún accesorio no está debidamente en su lugar, vuelva a bajar al paciente a la superficie estacionaria y corrija el problema, ya que de lo contrario se pueden producir daños o lesiones.

Realice los ajustes de seguridad y comodidad pertinentes antes de mover el paciente. Los brazos del individuo deben estar dentro de las tiras.

Use la eslinga recomendada por el doctor, profesional de enfermería o asistente médico del paciente para la comodidad y seguridad del individuo que va a ser levantado.

Cerciórese de revisar los accesorios de la eslinga cada vez que ésta se retire y vuelva a colocar a fin de garantizar que esté debidamente afianzada antes de retirar al paciente de una superficie.

La utilización de un solo asistente se basa en la evaluación que realice el facultativo de cada caso en particular.

Traslado a una silla o silla de ruedas:

Este paso es posterior a la elevación del paciente, vea el capítulo anterior para ver cómo debe realizarse esta operación.

NOTA: Para este procedimiento de traslado, consulte las diferentes fotografías.

1. Compruebe que la plataforma con el paciente en la eslinga estén correctamente sujetos.

FOTO

2. Coloque la silla de ruedas en el lugar adecuado, libre de obstáculos.

3. Accione los frenos de las ruedas de la silla de ruedas para evitar su desplazamiento, (Figura 1.1).

ADVERTENCIA

NO coloque al paciente en la silla de ruedas sin antes activar los frenos. Antes de colocar al paciente en una silla de ruedas para transportarlo, los frenos de las ruedas de la silla **DEBEN** estar activados, ya que de lo contrario se pueden producir lesiones.

4. Posicione la plataforma introduciendo la parte delantera entre las ruedas delanteras de la silla de ruedas.

FOTO

5. Frene las ruedas con freno de la plataforma.

FOTO

6. Una vez el paciente está alineado con la silla de ruedas, puede sacar la eslinga de un soporte, para dejar bajar al paciente a la silla de ruedas.

FOTO

NOTA: si el paciente no tiene suficiente fuerza para descender con las piernas, el cuidador puede ayudarse de la eslinga deslizante, para ir sujetando al paciente mientras baja hasta la silla de ruedas.

FOTO

ADVERTENCIA

6. Una vez el paciente está sentado en la silla de ruedas, puede retirar la eslinga por completo de los soportes de la plataforma.

FOTO

7. Indique al paciente que levante sus pies del reposapiés. Ayúdelo si fuera necesario.

FOTO

8. Retire la eslinga del paciente.

FOTO

9. Desbloquee las ruedas traseras y aparte la plataforma de la silla de ruedas.

FOTO

PARTE 6—SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	FALLO	SOLUCIÓN
Ruido o sonido de resequedad en los puntos de giro.	Necesita lubricación.	Consulte la sección Lubricación de la plataforma en la página 11.
El soporte de piernas no se desliza.	Necesita lubricación o limpieza.	Limpie la zona obstruida i engrase dicha zona.
Las ruedas no giran correctamente.	Necesita lubricación o limpieza.	Limpie la zona obstruida i engrase dicha zona. Si no giran consulte con su distribuidor para su reemplazo.

NOTA: Si no soluciona los problemas con los métodos sugeridos, comuníquese con su distribuidor Solmats.

PARTE 7—MANTENIMIENTO

COMPONENTE	INICIAL	INSPECCIÓN/AJUSTE CADA MES	INSPECCIÓN DOMÉSTICA CADA 6 MESES
BASE			
Inspeccione si hay anclajes faltantes.	X	X	X
Revise si las ruedas y pernos de eje están apretados y presentan desgaste.	X	X	X
Revise que las ruedas giren y rueden suavemente.	X	X	X
Revise que no haya suciedad en las ruedas.	X	X	X
EL MÁSTIL			
DEBE estar instalado firmemente a los brazos de la plataforma.	X	X	X
Revise en busca de dobleces o torceduras.	X	X	X
BRAZOS Y UNIONES DE LA PLATAFORMA			
Revise todos los anclajes y puntos de conexión.	X	X	X
Revise en busca de dobleces o torceduras.	X	X	X
Revise si hay desgaste en las juntas apernadas de los brazos de la plataforma.	X	X	X
Revise que los brazos de la plataforma estén centrados entre las patas de la base.	X	X	X
LIMPIEZA			
Cada vez que sea necesario.	X	X	X
ESLINGAS			
REVISE TODAS LAS CONEXIONES DE LA ESLINGA			
cada vez que se use para garantizar una correcta colocación y seguridad del paciente.	X	X	X
Revise si hay desgaste en el material de la eslinga.	X	X	X
Revise si hay desgaste en las correas.	X	X	X

NOTA: Siga los procedimientos de mantenimiento descritos en este manual para mantener la plataforma en óptimas condiciones.

La plataforma Solmats está diseñada para brindar máxima seguridad, eficacia y servicio satisfactorio con un cuidado y mantenimiento mínimos.

Si bien todas las partes de la plataforma Solmats están fabricadas de acero de la mejor calidad, se producirá desgaste por el contacto de metal contra metal tras un uso considerable.

No es necesario realizar ajustes o mantenimiento a las ruedas, aparte de la limpieza, lubricación y revisar que los pernos giratorios y eje estén apretados. Elimine toda suciedad de las ruedas y cojinetes. Si alguna parte está desgastada, reemplácela INMEDIATAMENTE.

Si tiene alguna inquietud sobre la seguridad de alguna de las partes de la plataforma, comuníquese INMEDIATAMENTE con su distribuidor.

Limpieza de la eslinga y la plataforma

Debe lavar la eslinga regularmente en agua cuya temperatura no exceda 203°F (95°C), con un producto de limpieza biológico. Todo lo que necesita para limpiar la plataforma de sedestación es un paño suave, humedecido con agua y una pequeña cantidad de detergente suave. Es posible lavar la plataforma con limpiadores no abrasivos.

Detección de desgaste y daños

Es importante inspeccionar todos los componentes clave, tales como eslingas, brazo de elevación y cualquier punto giratorio de las eslingas en busca de fisuras, deshilachamiento, deformación o deterioro. Reemplace INMEDIATAMENTE cualquier parte defectuosa y cerciórese de no utilizar la plataforma sin antes efectuar las reparaciones.

Lubricación de la plataforma

NOTA: ver los puntos críticos en la página 11.

La plataforma Solmats está diseñada para necesitar un mantenimiento mínimo. Sin embargo, la unidad debe inspeccionarse y lubricarse cada seis meses para garantizar un funcionamiento seguro y confiable prolongado.

Mantenga las eslingas limpias y en buen estado. Debe indicar a su distribuidor cualquier defecto que detecte tan pronto como sea posible.

Las ruedas DEBEN girar y rodar suavemente. Se puede aplicar grasa liviana (lubricante de automóvil impermeable) una vez al año a los cojinetes de las ruedas. Aplique de forma más frecuente si las ruedas están expuestas a condiciones extremas de humedad.

SERVICIO AL CLIENTE Y GARANTIAS

España:	CREA&AJUDA SL C/Vilalta 3, 25748 Cabanabona, Lleida. Teléfono y Fax 973 460 049
---------	--

CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD C.E.



Con el presente, el FABRICANTE:

Nombre: CREA & AJUDA S.L.
NIF: B-25.626.540.
Dirección: Calle Vilalta, nº 3, 25748 CABANABONA (Lleida)
Teléfono: +34-973 460 049

De la máquina:

Tipo de máquina: Plataforma de sedestación de accionamiento manual para la transferencia de discapacitados y enfermos, uso en interior.
Clase producto sanitario: Clase I.
Marca: SOLMATS®
Modelos: SOLWEY
Nº de fabricación: _____
Año de fabricación: 201_____
Masa de la plataforma: XX Kg.
Masa máx. total a transportar: 150 Kg.

Datos de las ruedas:

Fabricante: TENTE, BICKLE
Tipo de rueda: 5377 PJP 100 P30-13 RAL 7001
5940 UAP 075 P30-8 RAL 7001
226431 (Delante)
Capacidad de carga: 100kg, 90kg y 100 Kg, respectivamente

DECLARA:

Que la máquina comercializada satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud correspondientes en aplicación de la Directiva Europea de Seguridad de Máquinas 2006/42/CEE.

A si mismo las directivas 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios, conforme a la clase I, y modificada por la Directiva 2007/47/CE de 21 de marzo de 2010. No quedan incluidos en este certificado los elementos fabricados por terceros, pues tienen su propia certificación, pero sí su instalación.

Para tal fin se han cumplido estrictamente las normas:

- UNE-EN ISO 12100-1
- UNE-EN ISO 14121-1
- UNE-EN ISO 12100-2
- UNE-EN ISO 10535:2007

Firma y Sello Empresa